



Referencia: SOFM/BBG/cam

Fecha: 06/08/2025


Ref. AEMPS: NI PS 46/2025

Nota Informativa Productos Sanitarios 46/2025

LA AEMPS ADVIERTE DEL RIESGO ASOCIADO A UNA COLOCACIÓN INCORRECTA DEL MOSQUETÓN EN LA GRÚA DE ELEVACIÓN INVACARE BIRDIE

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de Invacare Portugal, Lda. (Portugal), de la posibilidad de que, en determinadas grúas de elevación Birdie, el mosquetón no se encuentre correctamente montado en el brazo de la grúa y de que la percha no esté correctamente fijada al mosquetón, lo que podría ocasionar incidentes graves durante su uso.

Las instrucciones de uso del fabricante proporcionan toda la información necesaria para manejar y utilizar el dispositivo de forma correcta y segura. Es importante verificar que el mosquetón permanezca siempre en la posición correcta de montaje. Para ello, debe comprobarse que el mosquetón no pueda rotar completamente dentro de las piezas plásticas donde está ubicado. En caso de que esto ocurra, significaría que las piezas de plástico están desgastadas y deben reemplazarse.

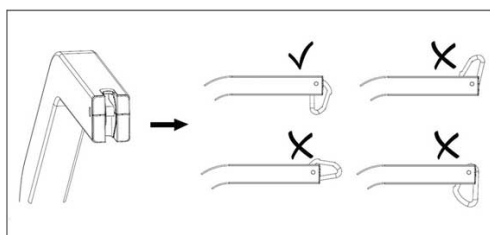

Detalle con la posición correcta(arriba) e incorrecta (abajo) del mosquetón en el brazo de la grúa

Los productos afectados han sido distribuidos en España por la empresa Invacare Portugal, Lda. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a personas usuarias, distribuidores y ortopedias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/098600	Escrito	Solicitudes y remisiones generales		2025/0718656
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Jefa Sección de Medicamentos			
2				

Información para personas usuarias:

- Verifique que el mosquetón permanece en la posición correcta de montaje en el brazo de la grúa de elevación Birdie. Para ello, asegúrese de que el mosquetón no pueda rotar completamente dentro de las piezas plásticas donde se ubican las conexiones de la percha.
- Confirme la correcta fijación de la percha en el mosquetón.
- Si detecta algún problema, no utilice la grúa y contacte con su proveedor antes de continuar usándola.
- Recuerde que las inspecciones periódicas deben ser realizadas por personal cualificado, con conocimiento del diseño, uso y mantenimiento de la grúa.
- Utilice el producto únicamente conforme a su finalidad prevista y siguiendo siempre las indicaciones recogidas en sus instrucciones de uso.
- Mantenga actualizada la lista de verificación de mantenimiento y consérvela junto al manual de usuario de la grúa de elevación Birdie.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 2 / 2
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/098600	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2025/0718656
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefa Sección de Medicamentos			
2			